



Guide d'installation du logiciel




Se connecter à:

source.tandemdiabetes.com



Créer un compte

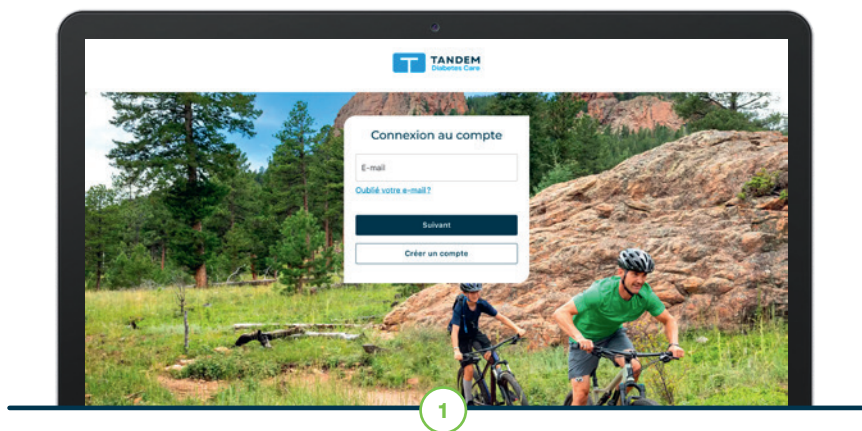

Si vous avez déjà un compte client Tandem, connectez-vous en utilisant la même adresse e-mail et le même mot de passe.

- ✓ Si vous n'avez pas de compte Tandem, cliquez sur **Créer Un Compte** et suivez les instructions. Un e-mail de vérification vous sera envoyé pour activer votre compte.


Charger les données de la pompe

- ✓ Cliquez sur **Téléverser la pompe** dans la barre de navigation à gauche.
- ✓ Branchez la pompe sur l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec la pompe.



2

Partager un compte

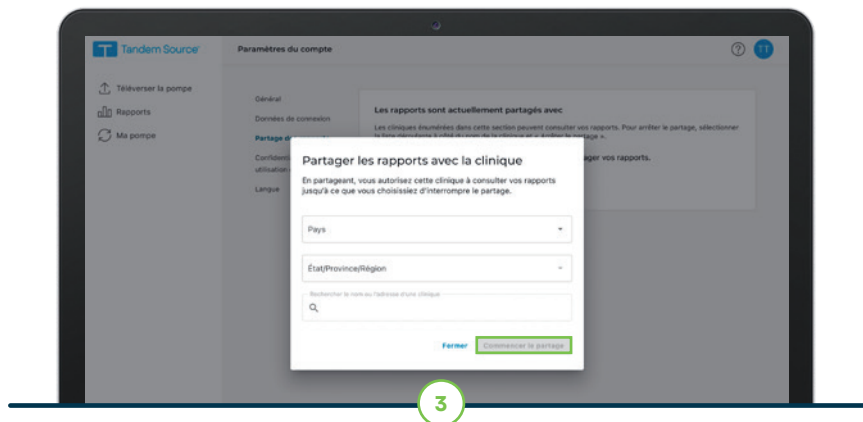


3

Cliquez sur le cercle en haut à droite avec vos initiales et sélectionnez **Paramètres du compte**.

- ✓ Sélectionnez **Partager les rapports** puis cliquez sur le bouton **Ajouter une clinique**.
- ✓ Affinez votre recherche en sélectionnant votre lieu de résidence ou commencez à taper le nom de votre clinique.
- ✓ Sélectionnez votre clinique et vérifiez l'adresse fournie

Une fenêtre pop-up peut apparaître pour vous avertir que source.tandemdiabetes.com veut se connecter à un port série. Cliquez sur Port COM virtuel Tandem et cliquez sur **Connecter**.

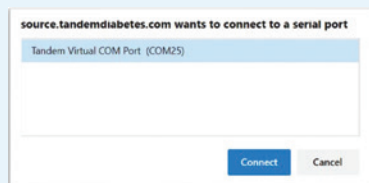

- ✓ Cliquez sur **Commencer le chargement** pour commencer le chargement des données
- ✓ Lors du premier chargement, il vous sera demandé de connecter votre pompe. Sélectionnez **Connecter une pompe**.
- ✓ Ne déconnectez pas tant que vous n'avez pas vu la coche confirmant que le chargement des données a réussi.



Les données de la pompe peuvent également être chargées via le câble USB Tandem.



La plateforme Tandem Source est destinée aux personnes atteintes de diabète sucré qui utilisent les pompes à insuline Tandem Diabetes Care, à leurs soignants et à leurs professionnels de santé à domicile et en milieu hospitalier. La plateforme Tandem Source facilite la gestion du diabète grâce à l'affichage et à l'analyse des informations exportées par les pompes à insuline Tandem.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Tous droits réservés. Tandem Diabetes Care, les logos Tandem, Tandem Source et t:slim X2 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Tandem Diabetes Care, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques de tiers sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ML-1014688_A