


Melden Sie sich an unter:

source.tandemdiabetes.com

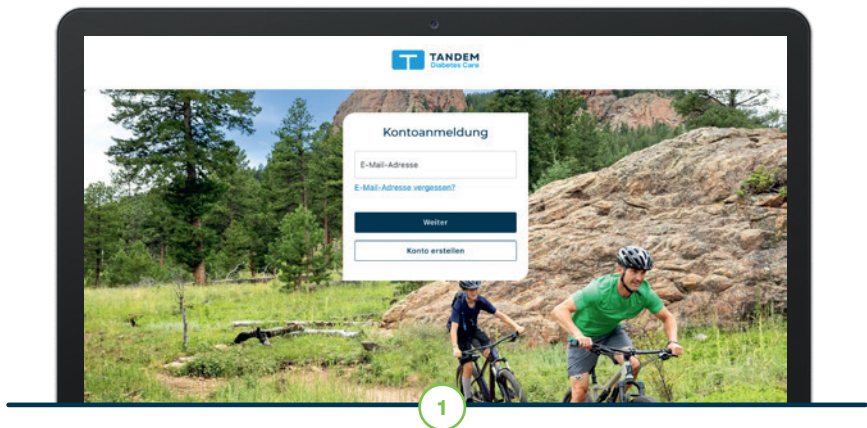

Konto erstellen



Wenn Sie bereits ein Kundenkonto bei Tandem haben, melden Sie sich mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und dem dazugehörigen Passwort an.

- ✓ Wenn Sie noch kein Tandem-Konto haben, klicken Sie auf **Konto erstellen** und folgen Sie den Anweisungen. Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren.


Pumpe hochladen

- ✓ Klicken Sie auf **Daten hochladen** in der linken Navigationsleiste.
- ✓ Schliessen Sie die Pumpe über das mit der Pumpe gelieferte USB-Kabel an den Computer an.



2


Konto teilen

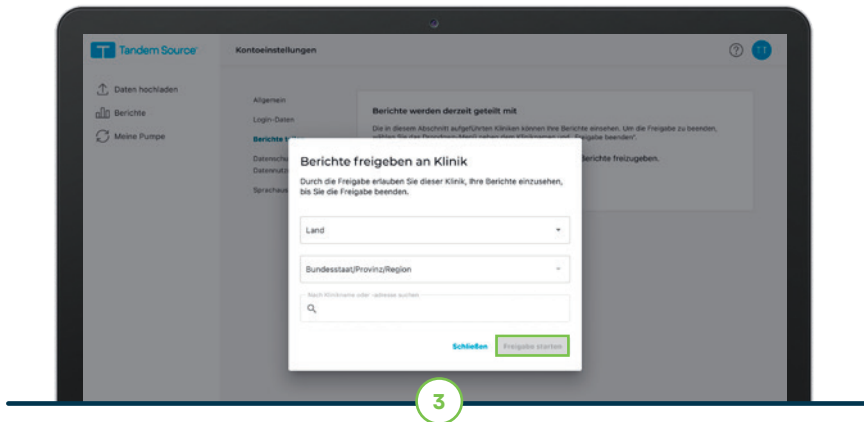

Klicken Sie auf den Kreis mit Ihren Initialen oben rechts in der Ecke und wählen Sie **Kontoeinstellungen**.

- ✓ Wählen Sie **Berichte freigeben** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Klinik hinzufügen**.
- ✓ Schränken Sie die Suche ein, indem Sie Ihren Standort auswählen oder die ersten Buchstaben des Namens Ihrer Klinik eingeben.
- ✓ Wählen Sie Ihre Klinik aus und überprüfen Sie die Angabe anhand der angegebenen Adresse.

Möglicherweise wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass source.tandemdiabetes.com mit einem seriellen Anschluss verbunden werden möchte. Klicken Sie auf Tandem Virtual COM Port, um den Anschluss zu markieren, und klicken Sie auf **Verbinden**.

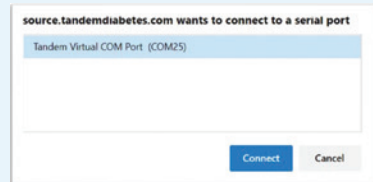

- ✓ Klicken Sie auf **Upload starten**, um mit dem Hochladen der Daten zu beginnen.
- ✓ Beim ersten Hochladen werden Sie aufgefordert, Ihre Pumpe zu verbinden. Wählen Sie **Pumpe verbinden**.
- ✓ Trennen Sie die Verbindung erst, wenn das Häkchen angezeigt wird, das bestätigt, dass die Daten erfolgreich hochgeladen wurden.



Die Pumpendaten können auch über das USB-Kabel von Tandem hochgeladen werden.



Die Tandem Source-Plattform ist für Personen mit Diabetes mellitus bestimmt, die Insulinpumpen von Tandem Diabetes Care verwenden, sowie für ihre Betreuungspersonen und Gesundheitsdienstleister im häuslichen und klinischen Umfeld. Die Tandem Source-Plattform unterstützt das Diabetes-Management durch die Anzeige und Analyse von Informationen, die von Tandem-Insulinpumpen hochgeladen werden.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tandem Diabetes Care, die Tandem-Logos, Tandem Source und t:slim X2 sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Tandem Diabetes Care, Inc. in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle Marken Dritter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ML-1014688_A