

Control-IQ-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Eine Erinnerung, eine Warnung, ein Fehler oder ein Alarm ist aktiv.
	Ein Bolus wird abgegeben.
	Basalinsulin ist eingestellt und wird abgegeben.
	Eine temporäre Basalrate ist aktiv.
	Control-IQ Technologie gibt einen automatischen Korrekturbolus ab.
	Die CGM-Sensorsitzung ist aktiv und der Transmitter kommuniziert mit der Pumpe.
	Die CGM-Sensorsitzung ist aktiv, aber der Transmitter kommuniziert nicht mit der Pumpe.
	Control-IQ Technologie erhöht die Basalinsulinabgabe.
	Control-IQ Technologie senkt die Basalinsulinabgabe.
	Alle Insulinabgaben werden beendet.
	Basalinsulinabgabe wurde gestoppt; Basalrate von 0 E/h ist aktiv.
	Eine temporäre Basalrate von 0 E/h ist aktiv.
	Control-IQ Technologie ist aktiviert, kann jedoch die Basalinsulinabgabe nicht erhöhen bzw. senken
	Control-IQ Technologie erhöht die Basalinsulinabgabe.
	Control-IQ Technologie senkt die Basalinsulinabgabe.
	Control-IQ Technologie hat die gesamte Basalinsulinabgabe gestoppt.
	Die Aktivität «Schlaf» ist eingestellt.
	Die Aktivität «Bewegung» ist eingestellt.