

Pour une vraie vie d'enfant



Respireo **SOFT** Baby



Respireo **SOFT** Child



- Les enfants ont des visages très différents de ceux des adultes. **La gamme pédiatrique Respireo SOFT Baby et SOFT Child**, n'est pas une gamme adulte réduite à la taille enfant, elle a été entièrement développée avec des experts en pédiatrie afin de répondre aux besoins spécifiques des petits et de leurs entourages.
- Respireo SOFT accompagne les enfants **dès leur naissance jusqu'à leurs 6 ans environ**.

Dédié aux enfants

- Design innovant spécifiquement conçu pour s'adapter à la structure osseuse et la fragilité de la peau des enfants
- Répartition des points d'appui
- Maintien en douceur

Extra-Confortable

- Contact extra-souple avec la peau
- Champ de vision dégagé
- Liberté de mouvements
- Possibilité de jouer, réaliser les activités du quotidien

Simple d'utilisation

- Facile à ajuster, porter et nettoyer
- Peu de composants pour faciliter l'utilisation quotidienne et la gestion des stocks
- Guide rapide d'utilisation vidéo et BD

Harnais 5 points

Pour répartir de manière homogène les points d'appui sur le crâne, et assurer la stabilité

SOFT Baby : 3 tailles XXS, XS et S

SOFT Child : taille Unique

NOUVEAU

Bulle SOFT

A jupe extra-fine pour garantir l'étanchéité tout en atténuant les points de contact avec la peau.

2 tailles spécifiques : 1 SOFT Baby, 1 SOFT Child


SOFT Baby : Attache du harnais par Velcro afin d'assurer la sécurité du nourrisson et le bon déroulement du traitement

Baby : 3 à 12 kg (environ jusqu'à 1 an)

SOFT Child : Des crochets ont été ajoutés pour permettre à l'enfant plus grand d'utiliser son masque en toute autonomie et de conserver les réglages du harnais


Child : 1,5 à 6 ans (environ de 10 à 20 kg)

*Les cibles d'âges peuvent varier en fonction de la pathologie de l'enfant, de son visage etc.

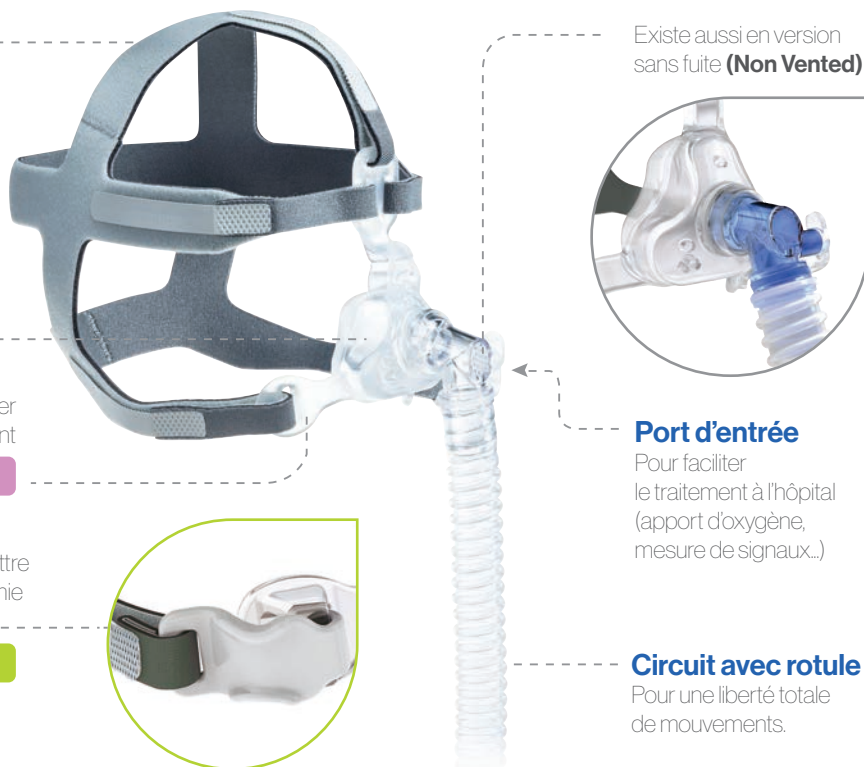

Guide rapide de mise en place

Montage

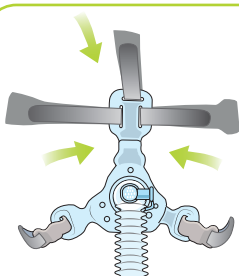


Assemblez le harnais sur le masque en fixant une à une les 3 branches supérieures dans les encoches. Puis connectez le tube sur le masque silicone.

Découverte




Comme vous, l'enfant peut être inquiet de devoir porter un masque. Prenez le temps de lui présenter le masque pour lui expliquer son rôle, le rassurer et que cela devienne un jeu.

Installation

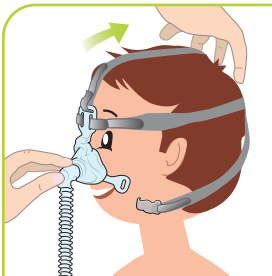


Posez la bulle sur le nez de l'enfant, passez le harnais par dessus la tête. Puis fixez les crochets.

Réglages

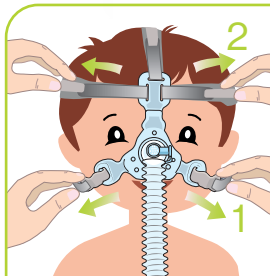

Ajustez les réglages du harnais, du bas vers le haut. Veillez à ne pas trop serrer le harnais. La bulle ne doit pas gêner la bouche.

Utilisation

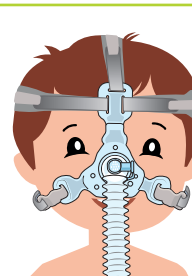

Le masque est prêt. Connectez le tube au circuit de l'appareil de ventilation. Si des fuites ou des points d'appui apparaissent sous ventilation, réajustez légèrement le harnais.

Note : il existe un guide spécifique pour le SOFT Baby

Respireo **SOFT**
Baby

Codes	Désignation	Taille
KM225300	Respireo SOFT Baby (référence fabricant 472700*)	XS
KM225400	Respireo SOFT Baby (référence fabricant 472703*)	S
KM227300	Respireo SOFT Baby Non Vented (référence fabricant 472704*)	XS
KM227400	Respireo SOFT Baby Non Vented (référence fabricant 472705*)	S
KM229108	Harnais Respireo SOFT Baby (référence fabricant 472715)	XXS
KM225500	Harnais Respireo SOFT Baby (référence fabricant 472701)	XS
KM225600	Harnais Respireo SOFT Baby (référence fabricant 472702)	S

NOUVEAU

Respireo **SOFT**
Child

Codes	Désignation	Taille
KM228900	Respireo SOFT Child (référence fabricant 472711*)	TU
KM229000	Respireo SOFT Child Non Vented (référence fabricant 472712*)	TU
KM229100	Harnais Respireo SOFT Child (référence fabricant 472714)	TU

Contact

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex

www.device.airliquidehealthcare.com
Mail : dl-fralms-src-france@airliquide.com

Hotline ALMS : **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

Respireo SOFT Baby est un masque nasal destiné à être utilisé sur des enfants ayant un poids compris entre 3 et 12 kg, pour lesquels une thérapie de pression positive continue (CPAP) ou de ventilation à deux niveaux de pression positive (Bilevel) a été prescrite. Respireo SOFT Baby est un masque mono-patient en utilisation à domicile, mais multi-patient en utilisation hospitalière.

Dispositif médical de classe IIa CE 0051 - Fabriqué par Air Liquide Medical Systems S.r.l. distribué par Air Liquide Medical Systems S.A. - Remboursé par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr
Lire attentivement le manuel d'utilisation. Date de mise à jour : Juin 2021
Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921735 R.C.S Nanterre.

Air Liquide
HEALTHCARE