

Atmung kinderleicht



Respireo **SOFT** Baby



Respireo **SOFT** Child



Kinder sind nicht einfach kleine Erwachsene! Die Beatmungsmasken *Respireo SOFT Baby* und *SOFT Child* wurden in enger Zusammenarbeit mit Kinderärzten und Beatmungsspezialisten der Kinder-Intensivmedizin entwickelt, um allen Bedürfnissen der Kleinen und ihrer Familien gerecht zu werden.

Die Masken der *Respireo SOFT pediatrics* - Serie decken nun die Zeit von der Geburt bis zum Alter von ca. 6 Jahren ab. (*SOFT Baby*: 3-12 kg; *SOFT Child*: 10-25kg)

Speziell für Kinder

- innovatives Design, abgestimmt auf die besondere und wachsende Gesichtsform von Kindern und ihre empfindliche Haut
- gleichmäßige Druckverteilung
- dauerhafter Tragekomfort ohne Druckstellen und Einengen

Extra-Komfortabel

- liegt besonders soft auf der Haut auf
- freies Sichtfeld
- Bewegungsfreiheit
- ermöglicht unbeschwertes Bewegen und Spielen

Einfache Anwendung

- einfache Handhabung vom Anlegen bis zum Reinigen
- geringe Anzahl an Komponenten erleichtern den täglichen Gebrauch und die Lagerhaltung
- bebilderte Schnellstartanleitung und Video

5-Punkt-Kopfband

Bietet eine gleichmäßige Druckverteilung und stabilen Halt unabhängig von Beatmungsdruck und Körperlage

SOFT Baby: 3 Größen (XXS, XS, und S)

SOFT Child: Universalgröße

NEW

Weiches, komfortables Maskenkissen

Das dünne, einzigartig geformte Maskenkissen vermeidet Leckagen und passt sich optimal für einen perfekten Sitz an.

Jeweils eine Größe für SOFT Baby und SOFT Child

SOFT Baby Die Maskenbänder werden direkt an die Befestigungspunkte geklettet, um eine sichere und erfolgreiche Therapie zu garantieren.

SOFT Child Mit den Befestigungshaken können ältere Kinder ihre Masken selbstständig und ohne Hilfe anlegen und anpassen

Auch erhältlich als **NON-VENTED VERSION**
Selbstverständlich sind alle *Respireo SOFT pediatrics* - Masken auch als geschlossene Version für die Beatmung mit Expirationsventil verfügbar.



Diagnostikanschluss


Für alle Arten von nichtinvasiven Messungen (CO₂, Druck, etc.)

360°-Kugelgelenk

Das Kugelgelenk und der flexible Schlauch ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit

Schnellstartanleitung

Zusammensetzen

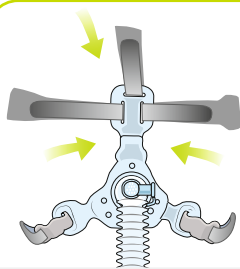


Setzen Sie Maske und Kopfband zusammen. Schließen Sie dann den Schlauch an die Maske an, indem Sie das Kugelgelenk mit dem Schlauch vorsichtig in den Maskenkörper hineindrücken.

Maske entdecken




Auch Kinder beunruhigt es möglicherweise, eine Maske zu tragen. Nehmen Sie sich Zeit zum Erklären und Zeigen, wofür sie gut ist. Ermutigen und machen Sie aus dem Gebrauch eine tägliche spielerische Anwendung.

Anlegen

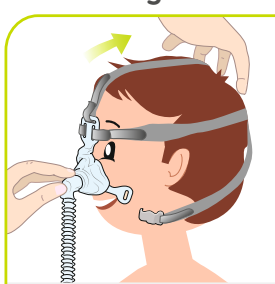


Positionieren Sie das Maskenkissen auf der Nase des Kindes und legen Sie die Kopfbänder um den Kopf. Schließen Sie dann die Befestigungshaken.

Anpassen

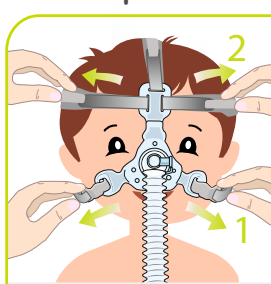

Passen Sie die Kopfbänder von unten nach oben an. Achten Sie darauf, dass die Bänder leicht anliegen. Das Maskenkissen darf den Mund nicht verdecken.

Verwenden

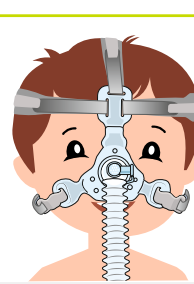

Schließen Sie den Schlauch an das Beatmungsgerät an. Führen Sie die Feinjustierung der Bänder unter dem eingestellten Beatmungsdruck durch und stellen dann die Kopfbänder vorsichtig ein, bis Druck- und Leckagestellen beseitigt sind.

Respireo **SOFT**
Baby

Artikelnummern

Größe

HMV-Nr.:

Herstellerreferenz:

KM225300 Respireo SOFT Baby

XS

14.24.16.2064

(472700*)

KM225400 Respireo SOFT Baby

S

14.24.16.2064

(472703*)

KM227300 Respireo SOFT Baby non-vented

XS

14.24.16.0010

(472704*)

KM226400 Respireo SOFT Baby non-vented

S

14.24.16.0010

(472705*)

NEW

KM229108 Kopfband SOFT Baby

XXS

(472715*)

KM225500 Kopfband SOFT Baby

XS

(472701)

KM225600 Kopfband SOFT Baby

S

(472702)

Respireo **SOFT**
Child

KM228900 Respireo SOFT Child

14.24.16.2072

(472711*)

KM229000 Respireo SOFT Child non-vented

14.24.16.0011

(472712*)

KM229100 Kopfband SOFT Child

(472714)

KM228000 Maskenschlauch SOFT pediatrics (10 Stk.)

(472709)

KM228100 Maskenschlauch SOFT pediatrics non-vented (10 Stk.)

(472710)

Bitte beachten Sie die beiliegende, ausführliche Gebrauchsanweisung!

(*) Medizinprodukt Klasse IIa, CE 0051 Hergestellt durch Air Liquide Medical Systems Spa. Vertrieb durch Air Liquide Medical Systems SA

Air Liquide
HEALTHCARE